

“Een warme deken is een gemakkelijke en veilige methode om het patiëntcomfort te verhogen en rillen voor en na een operatie te voorkomen”

VERVAARDIGD IN ZWEDEN!

KANMED WARMTEKASTEN worden in Zweden gemaakt van roestvrij staal en hoogwaardige onderdelen. De kasten zijn dan ook zeer robuust. Ze zijn ontworpen met het oog op intensief gebruik in een ziekenhuisomgeving. De verwachte probleemloze levensduur is 15 tot 20 jaar.

De **KANMED WARMTEKASTEN** verwarmen met circulerende warme lucht. De temperatuur in de universele kasten kan worden ingesteld tussen 35°C en 50°C. De in de fabriek ingestelde maximumtemperatuur is 42°C. De temperatuur in de dekenkasten kan worden ingesteld tussen 35°C en 80°C. De in de fabriek ingestelde maximumtemperatuur is 70°C. Indien nodig kan een technicus de temperatuurlimieten eenvoudig aanpassen of blokkeren, de alarmlimieten voor de maximale en minimum temperatuur inschakelen enz.

SPECIALE FUNCTIES

- ***Deuren kunnen links- of rechtsdraaiend worden opgehangen***
- ***Dubbel isolerend veiligheidsglas***
- ***Laag stroomverbruik***
- ***Zeer stil***
- ***Zeer gemakkelijke toegang tot zaken in de kast***
- ***Magnetische deursluiting***
- ***In hoogte verstelbare poten of vergrendelbare wielen***
- ***Eenvoudig schoon te maken***
- ***2 jaar garantie***

KANMED° WARMINGCABINET

BESTELINFORMATIE

Artikel-/Bestelnummers:	GROTE KAST		KLEINE KAST		COMBINATIEKAST
	Universeel	Dekenverwarming	Universeel	Dekenverwarming	Vloeistof- en dekenverwarming
Kast met verstelbare poten	GE-2350L	GE-2380L	GE-2350S	GE-2380S	GE-2350D
Legplank	GE-41500	-	GE-41500	-	GE-41500
Mand	GE-41600	-	GE-41600	-	GE-41600
Legplank dekenkast	-	GE-41580	-	GE-41580	GE-41580
Wielenset grote kast	GE-41700	GE-41700	-	-	GE-41700
Wielenset kleine kast	-	-	GE-41900	GE-41900	-

EXTRA INFORMATIE:

Buitenmaten Hoogte/ Breedte/ Diepte	168 cm / 66 cm / 64 cm Hoogte zonder wielen of poten		95 cm / 66 cm / 64 cm Hoogte zonder wielen of poten		168 cm / 66 cm / 64 cm Hoogte zonder wielen of poten
Inhoud	≈415 Liters	≈415 Liters	≈190 Liters	≈190 Liters	≈160 + ≈160 Liters
Binnenmaten Hoogte/ Breedte/ Diepte	140 cm / 56 cm / 53 cm		65 cm / 56 cm / 53 cm		≈59cm / 56cm / 53 cm x 2
Hoogte poten Hoogte wielen	Pootjes 13-18 cm. Wielen 16 cm. De wielen maken de grote kasten 10 cm hoger en 2 x 13 cm breder.				
Voltages/ Max. vermogen/ Zekeringen	230 VAC ± 10% / ≈900W (1800W Combinatiekast) / T6,3A / 10A 250V. 115 VAC 60Hz is ook verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op met Kanmed.				
Gemiddeld stroomverbruik	100 -200W	150 -250W	100 -200W	150-250W	150-250W
Maximaal aantal manden/legplanken	10	5	5	2	4 in het vloeistofvak 2 in het dekenvak
Legplank Breedte/ Diepte/ Hoogte Gewicht (GE-41500 en GE-41580)	52x50x2 cm 4 kg	49x53x1,2 cm 2,2 kg	52x50x2 cm 4 kg	49x53x1,2 cm 2,2 kg	52x50x2 cm
Afmetingen mand Gewicht (GE-41600)	52x50X10cm 6 kg	Alleen legplanken (GE-41580)	52x50x10cm 6 kg	Alleen legplanken (GE-41580)	52x50x10cm 6 kg
Gewicht zonder legplanken/manden	≈130 kg	≈130 kg	≈100 kg	≈100 kg	≈140 kg
Deuren met magneetsluiting	Deuren kunnen links- of rechtsdraaiend worden opgehangen. Fabrieksstandaard is linksdraaiend. Geef dit aan bij uw bestelling. Houd voor rechtsdraaiende deuren rekening met drie weken extra levertijd.				
Max. belasting per legplank/mand	20 kg				
Verwarmingscapaciteit	Verwarmt in minder dan 3 uur 10 Kanmed gelpads GE-455015 van 22°C tot 40°C.				
Temperatuurbereik	35°C tot 50°C	35°C tot 80°C	35°C tot 50°C	35°C tot 80°C	36°C tot 50°C 36°C tot 80°C
Nauwkeurigheid	± 2°C	± 4°C	± 2°C	± 4°C	±2°C and ±4°C
Fabrieksinstelling maximum temperatuur	42°C	70°C	42°C	70°C	42°C and 70°C
Overige functies/informatie	Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Geïsoleerd met polyurethaanschuim voor minimaal warmteverlies en optimale geluids-isolatie De deur is voorzien van dubbel energiebesparend veiligheidsglas. De grote en kleine universele kasten zijn voorzien van rails voor 10/5 legplanken of manden. Hoogte tussen de legplanken en manden in de universele kast is ≈13 cm. In de verwarmingskasten voor dekens kunnen de legplanken in stappen van 13 cm naar boven of beneden worden verplaatst.				
Temperatuurregeling	Programmeerbare elektronische thermostaat met display. De temperatuur kan op een vaste stand worden ingesteld. Een capillaire thermostaat waarborgt een onafhankelijke bescherming tegen oververhitting. In het verwarmingselement is een bimetalen thermostaat ingebouwd.				


EEN UITSTEKENDE COMBINATIE!

Het Kanmed Operatherm patiëntverwarmings-systeem wordt vooral gebruikt in en rond de operatiekamer, maar is ook praktisch voor verwarming tijdens cardiovasculaire röntgen-procedures, in neonatale omgevingen enz. De Kanmed Operatherm helpt in combinatie met de Kanmed gelpads, die worden voorverwarmd in de Kanmed warmtekast, onderkoeling bij patiënten te voorkomen en het comfort van patiënten te vergroten. Kostenbesparend doordat er geen wegwerpmaterialen nodig zijn en doordat aan onderkoeling gerelateerde problemen afnemen.

KANMED° OPERATHERM



KANMED° GEL PADS

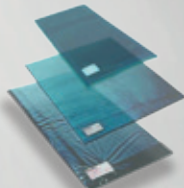

KANMED° WARMINGCABINET



KANMED^o WARMINGCABINET

Hoogwaardige warmtekasten dragen bij aan het voorkomen van peroperatieve hypothermie en meer comfort voor de patiënt.



KANMED COMBINATIEKAST

De **KANMED COMBINATIEKAST** is een combinatie van een kleine universele warmtekast en een kleine warmtekast voor dekens.



De kast wordt uitgevoerd met in hoogte verstelbare poten of vergrendelbare wielen.



Combinatiekast art. nr. GE2350D (Max. 4 legplanken of manden in het vloeistofvak en 2 planken in het dekenvak). Geef aan of u het vloeistofvak bovenin of onderin wilt laten maken.



KANMED WARMTEKASTEN VOOR DEKENS

Voor het snel en economisch verwarmen van: Dekens, handdoeken, lakens, enz.

De **KANMED WARMTEKAST VOOR DEKENS** wordt gebruikt in preoperatieve ruimtes en verkoevertkamers voor het opwarmen van dekens en andere materialen waarmee het bed van de patiënt wordt opgemaakt. De Kanmed warmtekasten dragen actief bij aan het verminderen van hypothermie voor en na de ingreep, waardoor oncomfortabel rillen wordt voorkomen.



Warmtekast voor dekens Large
Art. nr. GE-2380L (Max. 5 planken)

Warmtekast voor dekens Small
Art. nr. GE-2380S (Max. 2 planken)

KANMED UNIVERSELE WARMTEKASTEN

Voor het snel en economisch verwarmen van: irrigatievloeistoffen, intraveneuze en dialysevloeistoffen, gelpads, gelhoudend positioneringsmateriaal, instrumenten, enz.



Universele verwarming Kast Small
Art. nr. GE-2350S
(Max. 5 legplanken of manden)

Vergeleken met
minder goed geïsoleerde
kasten, kunt u met Kanmed
Kasten meer dan 350,- per
jaar besparen op uw
energieverbruik!



Universele warmtekast Large
Art. nr. GE-2350L
(Max. 10 legplanken of manden)

De **KANMED UNIVERSELE WARMTEKAST** is ontworpen om u te helpen bij het voorkomen van hypothermie bij patiënten en om patiënten meer comfort te bieden. De kasten worden vooral gebruikt in operatiekamers voor het verwarmen van intraveneuze vloeistoffen, dialyse- en irrigatievloeistoffen, Kanmed gelpads en ander gelhoudend positioneringsmateriaal.