

KANMED[°] OPERATHERM

Previene l'ipotermia durante gli interventi di chirurgia con una minima spesa





La nuova versione del Kanmed° Operatherm è sicura, semplice da usare ed economica. Il materasso riscaldante radiotrasparente viene posizionato sul tavolo operatorio con i Kanmed Gel Pads sopra di esso. La qualità e la lunga durata del sistema Kanmed° Operatherm rende possibile il riscaldamento dei pazienti ad un basso costo (circa 2–3 € per paziente).

L'IPOTERMIA DEVE ESSERE EVITATA

Oggigiorno gli operatori sanitari in ospedale sono allertati sulle conseguenze causate ai pazienti in ipotermia (aumento delle infezioni chirurgiche, sanguinamenti, degenza prolungata, etc.) I pazienti riscaldati hanno un ridotto rischio di incorrere nelle complicanze dovute ad ipotermia e contemporaneamente si ha una riduzione dei costi di gestione. Kanmed° Operatherm è un metodo efficace ed economico per aiutare a prevenire l'ipotermia ed è molto facile da usare.

AREA DI APPLICAZIONE

Kanmed° Operatherm è soprattutto usato nelle sale Operatorie ma è anche idoneo per il riscaldamento nelle procedure radiologiche cardio-vascolari, reparti neonatali, etc. L'abbinamento del materassino riscaldante e dei gel pads consente all'Operatherm di essere usato con la maggior parte dei vostri pazienti.

VERSIONE PER VETERINARIA E RICERCA

Una versione speciale è disponibile per uso veterinario e per la ricerca. La temperatura del materassino riscaldante può essere selezionata fino a 47 °C.



Avvolgere i Gel Pads all'interno del materassino riscaldante è un modo rapido per ottenere un pre-riscaldamento del sistema prima dell'arrivo del prossimo paziente.

DETERMINARE UN NUOVO STANDARD NEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO “SOTTO IL PAZIENTE”

INTERFACCIA INTUITIVO PER L'UTILIZZATORE


L'interfaccia è dotata di un display a colori che informa l'utilizzatore sulla temperatura impostata, la temperatura attuale, l'assorbimento di Potenza, il tempo di utilizzo, etc. Tutti i dati vengono salvati in una memoria per diversi anni.

SICUREZZA


Kanmed[°] Operatherm è dotato di una tecnologia avanzata in grado di determinare un nuovo standard nella sicurezza dei sistemi di riscaldamento “sotto il paziente”. Tutti i materassini riscaldanti sono radio-trasparenti e contengono 8 (4) elementi riscaldanti controllati singolarmente dall'Unità di Controllo. Gli elementi agiscono da sensori della temperatura e da riscaldamento al tempo stesso. Il connettore del materassino riscaldante è dotato di un indipendente controllo elettronico che monitorizza continuamente l'uscita dall'Unità di Controllo. Autonomamente dall'unità di Controllo esso può interrompere il riscaldamento nel caso in cui si manifesti un surriscaldamento anomalo.

SERVICE ANNUALE E CONTROLLI DI SICUREZZA SEMPLICI E RAPIDI DA ESEGUIRE

Il nuovo Operatherm informa i tecnici sui valori di calibrazione, eventi di allarme, età ed uso dei materassini riscaldanti, informazioni sul service e misurazioni per facilitare i controlli annuali del sistema di sicurezza.

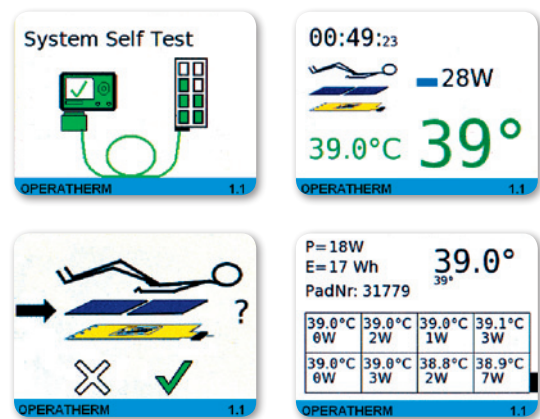

MATERASSINI RISCALDANTI

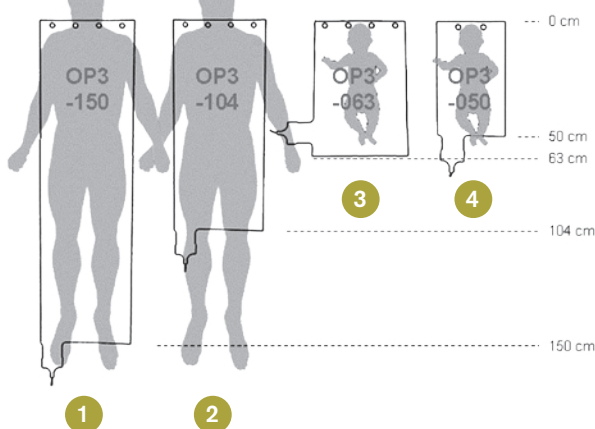


MATERASSINI RISCALDANTI



KANMED[°] OPERATHERM

UNITA' DI CONTROLLO	
DATI TECNICI	ART. N°:
	RANGE DI TEMPERATURA:
	VOLTAGGIO:
	DIMENSIONE E PESO:
	ALTRE CARATTERISTICHE:
MATERASSINI RISCALDANTI	
ART. N° OP3-104:	Materassino riscaldante Standard
DIMENSIONE E PESO:	104 x 45 cm. 2,0 kg
ART. N° OP3-150:	Materassino riscaldante Lungo
DIMENSIONE E PESO:	150 x 45 cm. 2,7 kg
ART. N° OP3-063:	Materassino riscaldante Corto
DIMENSIONE E PESO:	63 x 43 cm. 1,6 kg
ART. N° OP3-050:	Materassino riscaldante Pediatrico
DIMENSIONE E PESO:	50 x 30 cm. 1,0 kg
ALTRE CARATTERISTICHE:	Tutti i materassini riscaldanti sono radio-trasparenti. Il materassino riscaldante può essere pulito con tutti i comuni detergenti liquidi per superfici. Lunghezza del cavo: 2,8 m. Voltaggio del materassino riscaldante: 30 V AC
GEL PADS	
Nota: Kanmed [°] Operatherm non dovrebbe essere usato senza Kanmed Gel Pads al fine di ridurre i punti di pressione. Prodotto in PU.	
ART. N° GE-455015:	Per materassino riscaldante OP3-104 & OP3-150
DIMENSIONE E PESO:	45 x 50 cm, altezza 1,2 cm, 3,1 kg
ART. N° GE-436315:	Per materassino riscaldante OP3-063
DIMENSIONE E PESO:	43 x 63 cm, altezza 1,2 cm, 4,3 kg
ART. N° GE-305015:	Per materassino riscaldante OP3-050
DIMENSIONE E PESO:	30 x 50 cm, altezza 1,2 cm, 2,1 kg

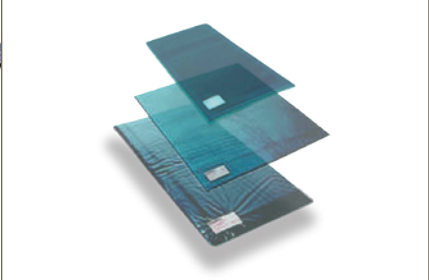KANMED [°] OPERATHERM	KANMED [°] GEL PADS	KANMED [°] WARMINGCABINET
		

UN'OTTIMALE COMBINAZIONE

Il sistema di riscaldamento pazienti Kanmed[°] Operatherm è soprattutto utilizzato in Sala Operatoria ma è adatto anche per il riscaldamento durante le procedure radiologiche cardio-

vascolari, in area neonatale etc. Kanmed[°] Operatherm abbinato ai Kanmed Gel Pads anti decubito, pre-riscaldati nel Kanmed Warming Cabinet, vi aiuterà a ridurre l'ipotermia nei pazienti

ed a migliorare il loro comfort. I costi di gestione sono ridotti evitando l'utilizzo di materiale monouso e riducendo i problemi associati ad ipotermia.