

KANMED[®] BABYWARMER

Optimal vækst med en sikker og simpel metode.

For præmature, nær-termin og nyfødte babyer.





Optimal vækst med en
sikker og simpel metode.





DERFOR BØR DU ANVENDE KANMED BABYWARMER

Gennem de seneste 20 år er mere end en million små- og præmature babyer blevet varmet effektivt på en Kanmed vandmadras.

- Kanmed BabyWarmer er designet til at holde præmature, nær-termin og nyfødte babyer perfekt varme og udstyret er velvalideret.
- Dette resulterer i at babyerne tidligere kan komme ud af kuvøse, slappe bedre af, sove bedre samt får optimal vækst.
- Den bløde varmtvandsmadras med babynest giver en varme og hygge, der kan sammenlignes med hud-mod-hud kænguruplejeprincippet.
- Kanmed BabyWarmer kan hjælpe til en tidligere udskrivning fra hospitalet, og dermed reducere omkostningerne.
- Kanmed BabyWarmer er enkel og sikker at anvende og skattet af babyen, forældre samt personalet.

FORDELE VED AT ANVENDE KANMED VANDMADRASSEN

Varmt vand indeholder en masse energi. Derfor kan babyen ikke nedkøle vandet og babyens hudtemperatur vil tilpasse sig til vandets temperatur – dette gør vandmadrassen til den mest effektive og sikre metode til, at holde babyens temperatur på 37°C. Kanmed vandmadrassen etablerer en termisk balance med babyen, således at babyens energi kan fokusere på det væsentlige – optimal vækst, fremfor at holde baby varm.

Endnu en fordel – i tilfælde af strømsvigt vil vandmadrassen holde babyen varm i op til to timer, da vand afkøles langsomt.

“Kun en varm, blød vandmadras kan erstatte varmeeffekten fra en moderne kuvøse”.

KANMED BABYWARMER SYSTEM

Kanmed BabyWarmer systemet er meget sikkert og let at anvende. Alle dele er af højeste kvalitet for at sikre en lang og problemløs levetid. Anvendt korrekt vil systemet sikre optimal varme til din baby.

KONTROLENHED



DEN NYE KANMED BABYWARMER

Der ligger 20 års erfaring bag den nye, CE mærkede, BabyWarmer.

Den nye BabyWarmer tilbyder 3 forskellige muligheder for at holde babyen varm med en og samme kontrolenhed og varmeplade.

- 1 En varm og blød Kanmed vandmadras
- 2 En varm og blød gelmadras
- 3 En varmet skummadras

Det er også muligt at tilslutte en standard YSI hudsensor, til kontrol af babyens temperatur.


ANVENDELSESFLADER

Vandmadras: Alle babyer fra 800 g



.....

Gelmadras: Nær-termin babyer fra 1500 g til fuldbårne

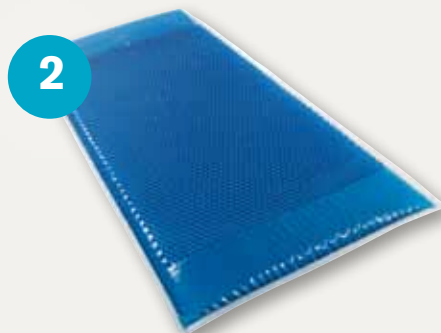


.....

Skummadras: Fuldbårne babyer og til komfortvarme



VARMEEFFEKT

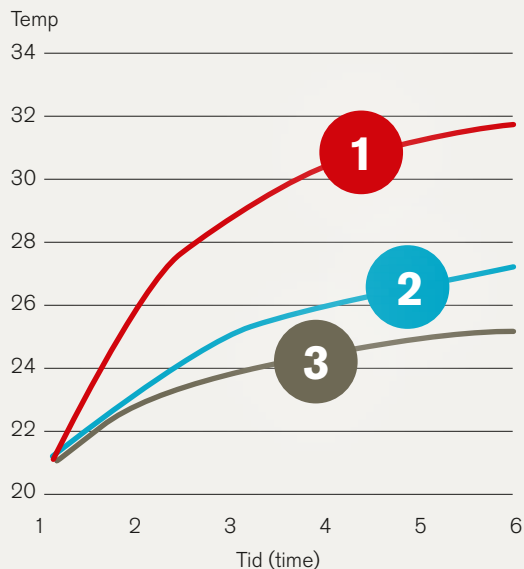

500 ml vandflaske

- Kanmed vandmadras
- Kanmed gelmadras
- Kanmed skummadras

Til at estimere varmeeffekten, blev en plastikflaske med 500 ml vand placeret på hver madrastype, ved en stabil temperatur på 37° C. Flasken blev dækket med et dobbelt lag af bomuldshåndklæde. Temperaturstigningen i vandet blev herefter registreret.

Som vist foroven har vandmadrassen den højeste energioverførsel og giver således den mest effektive opvarmning.

Effekten af vandmadrassen er blevet dokumenteret i adskillige publicerede studier.

Referencer inkluderer: PH Gray et al, University of Queensland, Australia. Cot nursing using a heated water filled mattress ... (2004).

Acta Paediatrica 93:308-310 2004-03-18. Prevention of Neonatal Cold Injury in Preterm Infants. Ragnar Tunell. Ass. Professor emeritus Stockholm

LET AT ANVENDE



Med en Kanmed BabyWarmer kan du starte med at varme en præmatur baby, fra det øjeblik den er stabil, men fortsat har behov for minimal klinisk intervention, f.eks. let støtte til respiration.

Vælg en madrastype der er passende til babyens behov.

Indsæt varmepladen i lommen bag på madrassen. Put madrassen ind i Kanmed BabyNest.

Tryk start og justér temperaturen.

Når smiley ikonet på skærmen bliver grønt er madrastemperaturen ok og klar til babyen.

FORDELE

- Tilskynder optimal vækst
- Let for personalet at anvende og rengøre
- Betragtelig besparelse i forhold til at anvende en kuvøse

SAMMENSÆT DIN KANMED BABYWARMER

Forskellige størrelser af nests, engangsnests, vandmadrasser osv. gør det let at tilpasse brugen af BabyWarmer til babyens behov og afdelingens rutiner.



BW3-001 EN KOMPLET STANDARDLEVERING AF KANMED BABYWARMER INDEHOLDER:

BW3-020 Kontrolenhed

BW-50-003 Vandmadras

BW-50-029-1, en flaske Vandmiddel

BW3-003 Lavspændingsvarmeplade

BW-50-025 Baby Nest (2stk.)

699-1171 Strømledning

BW3-0xx Instruktionsmanual

Bestilles som option: Gel- eller skummadras.



BW3-020 KONTROLENHED

Nyt design med letlæseligt display.

Den nye BabyWarmer tilbyder 3 forskellige muligheder for at holde babyen varm med en og samme kontrolenhed og varmeplade.

1. En varm og blød Kanmed vandmadras
2. En varm og blød gel madras
3. En varmet skummadras

Avanceret sikkerhedssystem. Det er muligt at tilslutte en standard YSI hudsensor til kontrol af babyens temperatur. Kan placeres på plan overflade, hænges i krogen eller monteres på en stang. Strømforsynes ved 100-240 V AC eller 12-24 V DC. Vægt: 1,5 kg, diameter 14 cm, højde 21 cm. Gennemsnitligt forbrug 15W.



BW3-003 VARMEPLADE

Lavspænding 24 V DC, 50W, vandtæt og let at rengøre.

Ingen potentielt skadelige magnetiske eller elektriske felter – unikt for Kanmed. Fire integrerede sensorer monitorerer kontinuerligt drift og temperatur.

Længde: 58 cm, bredde: 25 cm, tykkelse: 2 mm



BW3-0837 KLEMME TIL STANG

Til montering af BW3 kontrolenheden på en vertikal eller horisontal stang.



VANDMADRAS, GENEREL INFORMATION

Alle Kanmed vandmadrasser er lavet af stærk, blød PVC plastik. De er konstrueret med dæmpende rum, der reducerer vandets bevægelse, men stadig er så fleksible at de følger babyens bevægelser. En flaske – Vandmiddel er inkluderet, hvilket er klinisk påvist, at holde vandet rent i op til et år.

BW-50-003 VANDMADRAS

Dette er den mest benyttede vandmadras. Når madrassen er fyldt til niveaumærkerne indeholder den ca. 4–4.5 liter vand. Længde: 60 cm, bredde: 27 cm


BW-50-015 VANDMADRAS TIL TVILLINGER

Speciel vandmadras til tvillinger eller større babyer. Den holdes varm med blot én varmeplade.

Når madrassen er fyldt til niveau-mærkerne indeholder den ca. 10 liter vand. Længde: 60 cm, bredde: 60 cm

BW-50-010 VANDMADRAS TIL KANMED BABYBED

Speciel vandmadras der dækker det meste af sengens overflade (BB-1 eller BB-3). Den holdes varm med blot én varmeplade. Når madrassen er fyldt til niveau-mærkerne indeholder den ca. 9 liter vand. Længde: 60 cm, bredde: 40 cm

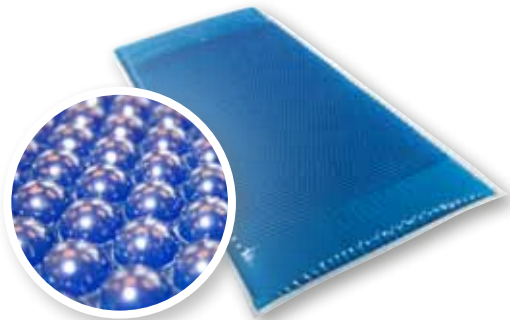

GE-602815 GELMADRAS MED LOMME

Kanmed gelmadras er fremstillet specielt til BW3 BabyWarmer. Gelmadrassen har en nubret overflade, der gør den blød og komfortabel at ligge på for babyen. Der er en lomme til at indsætte varmepladen. Hvis en vandmadras af forskellige årsager ikke kan benyttes, er en Kanmed gelmadras en ideel løsning. Passer til BW-50-025 Baby nest. 60 x 28 x 1,5 cm.



BW3-203 SKUMMADRAS MED LOMME

Skumadrassen er tiltænkt fuldbårne eller næsten fuldbårnebabyer og er til komfortvarme. Den er ikke designet for at fremme vækst for præmature babyer. Der er en lomme til at indsætte varmepladen. 60 x 28 cm.

BW-50-029-1 VANDMIDDEL


Det anbefales at anvende vandmiddel med vandmadrassen, da det er klinisk påvist at forbygge alge- og bakterieformering inden i vandmadrassen. Det holder vandet rent i op til et år. Skal tilføres hver gang vandet udskiftes eller der efterfyldes.

Pakke à 20 flasker.



BW3-099 YSI SENSOR TIL HUDTEMPERATUR

Sensoren til hudtemperatur kan tilsluttes på forsiden af kontrolenheden. Den målte temperatur samt øvre og nedre alarmgrænser vises automatisk. Temperatursensoren styrer ikke varmen til babyen.

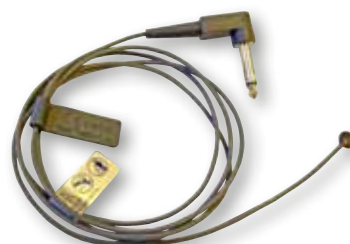

KANMED° BABYWARMER



BW-50-025 OG BW-50-025-XL

KANMED BABY NESTS

Kanmed Baby Nest er en genanvendelig rede, syet i et stykke. Varmeplade og -madras puttes blot ind i lommen på reden. Den er tiltænkt at lette en korrekt lejring samt skabe et hyggeligt miljø omkring babyen. Vasketemperatur: 60° C. Overflade- material: Bomuld, Fyld: Polyesterfibre, Længde: 65 cm. Bredde: 35 cm, Højde: 6 cm, indre mål: 40 cm.

BW-50-025 Baby Nest blå
BW-50-025-P Baby Nest pink
BW-50-025-Y Baby Nest gul

BW-50-025-XL BABY NEST

Kanmed Baby Nest XL er til større babyer, op til 4500 g, Redens længde: 65 cm, bredde: 35 cm, højde: 6 cm, indre mål: 60 cm.



BW-50-027 BABY NEST TIL TVILLINGER

Rede der passer til varenr.: BW-50-015 eller til to standardvandmadrasser. Længde: 65 cm, Bredde: 55 cm, Højde: 5 cm (fås kun i blå).



BW-50-200 ENGANGS BABY NEST

Fremstillet af ikke vævet stof. Længde 65 cm, Bredde: 35 cm Indre mål: 40 cm. Pakke à 10 stk.



BW-50-250 ENGANGS DÆKSTYKKER TIL BABY NEST

Rare og bløde, lavet i ikke vævet materiale, der er let at passe ned i Baby Nest. Det har en vandtæt underside. Det er tiltænkt at beskytte enten reder til engangsbrug eller den vaskbare version. Længde: 60 cm, bredde: 85 cm. Pakke à 100 stk.



BW3-007 BATTERIKABEL

For at kunne tilslutte kontrolenheden til et bilbatteri eller lignende 12 V DC strømforsyning. Udstyret med en universel cigarettænderstik, til anvendelse i køretøjer.



DEN MODERNE BABYBED HOSPITALSSENG GIVER EFFEKTIV ERGONOMI

Med Kanmed BabyBed tilbydes den bedste pleje for præmature og nyfødte babyer i medium- og lavintensive plejesituationer. Den hyggelige BabyBed er udviklet sammen med neonatalsygeplejersker for at opnå en høj grad af ergonomi. Højden på sengen kan let justeres elektronisk og de gennemsigtige sidevægge kan nemt lægges ned så der er let adgang til babyen. De bløde silikonehjørner er velegnede til at hvile armene på

under behandling. Sengen leveres med et flot designet telt til at reducere mængden af lyd og lys samt påvirkning af aircondition. De fleste Kanmed BabyBed er udstyret med BabyWarmer. Sammen udgør de en moderne plejeplads i neonatal intensiv pleje, føde- og barsels gange. Kanmed BabyBed og BabyWarmer benyttes overalt i verden.

KANMED BABYBED FÅS I TRE VERSIONER:

(De viste BabyBed er udstyret med KANMED BABYWARMER, der skal bestilles separat)



BB-1, KANMED BABYBED

Komplet seng inkluderer:

Elektrisk højdejustering, madras, telt (model BB-21/3) med teltstang, hylde, strømkabel, 19 cm nedfoldelige sidevægge (vægge på 24 cm er også tilgængelige).

BB-3, KANMED BABYBED FAST HØJDE

Komplet seng inkluderer:

Madras, telt (model BB-21/3) med teltstang, hylde, strømkabel, 19 cm nedfoldelige sidevægge (vægge på 24 cm er også tilgængelige).

BB-4, KANMED BABYBED TVILLING

Komplet seng inkluderer:

Elektrisk højdejustering, madras, telt (model BB-21/3) med teltstang, hylde, strømkabel, 24 cm nedfoldelige sidevægge. Kan rumme 2 komplette Kanmed BabyWarmer eller 1 BabyWarmer med tvillingevandmadras og tvillingenest.

TEKNISKE DATA

VARENR.	BB-1	BB-3	BB-4
BESKRIVELSE OG FARVE:	Standard seng. Unisex lyseblå.	Seng med fast højde. Unisex lyseblå.	Tvillingseng. Unisex lyseblå.
INKLUDERER:	Madras, telt, teltstang, hylde, 19 cm sidevægge (24 cm på tvillingsengen), strømkabel (BB-1 & BB-4). Manualer og eksportemballage.		
YDRE MÅL:	760 mm x 560 mm	760 mm x 560 mm	850 mm x 700 mm
SENGENS AREAL STØRRELSE/HØJDE:	665 mm x 445 mm/70 cm-99 cm	665 mm x 445 mm/Fast ved 80 cm	765 mm x 640 mm/70 cm-99 cm
VÆGT:	Ca. 33 kg	Ca. 25 kg	Ca. 40 kg
AKSELAFSTAND:	700 mm x 500 mm. Hjul: diameter 125 mm. Forhjul med bremses. Tilt: $\approx 22^\circ$		
MADRAS:	Polyether med PVC omkring. (665 x 445 x 30 mm)	Polyether med PVC omkring. (665 x 445 x 30 mm)	Polyether med PVC omkring. (765 x 640 x 30 mm)
TELT:	Bomuld og polyester. Vaskbar ved 60° C (alle modeller)		
HYLDE:	400 mm x 400 mm. Alle modeller. Maks. belastning 10 kg		
SPÆNDING:	100-240 Vac, 50/60 Hz	N/A	100-240 Vac, 50/60 Hz
STRØMFORBRUG:	100 VA	N/A	100 VA
ANVENDTE STANDARDER: ALLE SENGE BÆRER CE-MÆRKET	SS EN 60 601. Lever op til MDD.	Lever op til MDD.	SS EN 60 601. Lever op til MDD.

KANMED BABYBED TILBEHØR:



BB-101 SKUFFESYSTEM

Skuffesystem til montering bag på sengen. Komplet med 2 plastikopbevaringskasser (13 liter hver) samt monteringsbeslag.



BB-102 KOMPLET BAGHYLDE

Vertikale stænger 25 mm, 2 horisontale skinner 10 x 25 mm, 1 tophylde 500 x 300 mm. Inklusive beslag og skruer.



BB-TELTE

Telte fås i forskellige farver. Se tilgængelige farver og design på www.kanmed.se.



700-0743 FLASKEHOLDER

Holder i rustfrit stål til opbevaring af desinfektionsmiddel. Maks. diameter 70–80 mm.



TELTKIT TIL BARNSENGE

Passer til en standard barneseng. Min. bredde 34 cm. Kan roteres, så teltet vender væk fra sengen. Holdes på plads af madrassen.



700-0750 STRØMKABEL

Specielt strømkabel til samtidigt at strømforsyne Kanmed Babybed og BabyWarmer.



700-0829 KØREHÅNDTAG

For at lette transport med sengen eller til at hænge diverse tilbehør på.

KONKLUSION

Kanmed BabyWarmer og BabyBed giver dig mulighed for på et tidligt stadie at flytte en præmatur baby ud af kuvøsen og begynde den meget vigtige mor-barn- binding ved brug af hud-mod-hud Kænguruplejeprincippet.



KANMED^o BABYWARMER

Kanmed AB

Gårdsfogdevägen 18B | SE-168 66 BROMMA | SWEDEN

Tel +46 8 56 48 06 30 | Fax +46 8 56 48 06 39

info@kanmed.se | www.kanmed.se