

KANMED^o BABYWARMER

Semplice e sicuro per una crescita ottimale.

Per i nati prematuri, pre termine ed a termine.





KANMED BABYWARMER, ECCO PERCHÈ BISOGNEREBBE USARLO

Negli ultimi 20 anni più di un milione di bambini nati a termine e prematuri sono stati efficacemente riscaldati con il Materassino ad Acqua Kanmed.

- Numerosi studi hanno dimostrato che Kanmed BabyWarmer è stato progettato per mantenere i prematuri ed i neonati perfettamente al caldo.
- È dimostrato che i bambini vengono dimessi precocemente dall'incubatrice, si rilassano, dormono e crescono meglio.
- Il soffice e caldo Materassino ad Acqua Kanmed ed i nidi Kanmed Baby Nest provvedono a fornire un abbraccio simile a quello materno così come durante la marsupio terapia, pelle a pelle.
- Kanmed BabyWarmer permette di dimettere dall'ospedale il neonato in tempi più brevi, riducendo i costi di degenza.
- Kanmed BabyWarmer è semplice e sicuro, piace molto ai bambini ed ai genitori ed è apprezzato dal personale ospedaliero.

I VANTAGGI DEL MATERASSINO AD ACQUA KANMED

L'acqua calda è ricca di energia e poiché il bambino non la può raffreddare, la temperatura della pelle del bambino, raggiunge quella dell'acqua, rendendo così il Materassino ad Acqua il mezzo più confortevole ed efficace per mantenere la temperatura del neonato a 37°C. Il Materassino ad Acqua Kanmed garantisce una stabilità termica al neonato, in modo che questo possa utilizzare tutte le sue preziose energie per crescere, piuttosto che usarle per provare a mantenersi caldo.

Un altro vantaggio: in caso di interruzione di corrente il Materassino ad Acqua riesce a scaldare il bimbo in sicurezza fino a 2 ore, in quanto l'acqua si raffredda lentamente.

“Solo un morbido e caldo Materassino ad Acqua può sostituire in modo efficace il riscaldamento di una moderna incubatrice”.

SISTEMA DI RISCALDAMENTO NEONATALE KANMED

UNITA' DI CONTROLLO



IL NUOVO KANMED BABYWARMER

20 anni di esperienza hanno portato allo sviluppo del Nuovo Kanmed BabyWarmer.

Il nuovo BabyWarmer offre 3 possibilità di riscaldamento, utilizzando la stessa Unità di Controllo e lo stesso Pad Riscaldante.

- 1 Il caldo e soffice Materassino ad Acqua Kanmed
 - 2 Il caldo e morbido Materassino in Gel speciale
 - 3 Il caldo Materassino in Gomma piuma
- È inoltre possibile collegare un sensore standard YSI per il controllo della temperatura cutanea del neonato

Il Sistema di Riscaldamento Neonatale Kanmed è molto sicuro e facile da usare. Le parti che lo costituiscono sono di altissima qualità al fine di assicurare una vita del prodotto lunga e senza problemi. Utilizzato correttamente, garantirà un riscaldamento ottimale per il vostro bambino.

INTERFACCIA NEONATO

Materassino ad Acqua: per tutti i neonati a partire da 800g.



.....

Materassino in Gel: per neonati a partire da 1500g




.....

Materasso in Gomma piuma: per nati a termine e per un confortevole riscaldamento in reparto



EFFICIENZA TERMICA

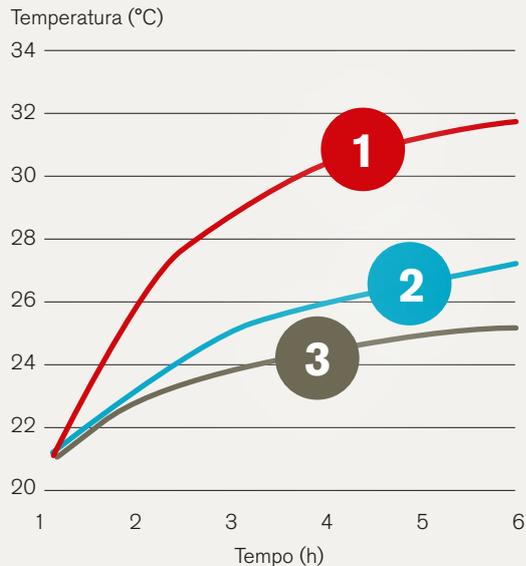

Bottiglia d'acqua da 500ml

- Materassino ad Acqua Kanmed
- Materassino in Gel Kanmed
- Materassino in Gommapiuma Kanmed

Per stimarne l'efficienza, è stata posta sopra ognuno dei tipi di materassini una bottiglia di plastica contenente 500ml d'acqua, ad una temperatura dei materassini stabile a 37°. La bottiglia è stata coperta con un doppio strato di asciugamani in cotone.

È stato registrato l'aumento di temperatura nella bottiglia d'acqua. Come già evidenziato in precedenza, il materassino ad acqua ha la più alta capacità di trasferimento di energia e quindi risulta essere il più efficiente e il più caldo.

L'efficienza del materassino ad acqua è stata documentata in molti studi pubblicati.

Referenze: PH Gray et al, University of Queensland, Australia. Cot nursing using a heated water filled mattress ... (2004).

Acta Paediatrica 93:308-310 2004-03-18.
Prevention of Neonatal Cold Injury in Preterm Infants.
Ragnar Tunell. Ass. Professor emeritus Stockholm.

FACILE DA USARE



Si può cominciare a scaldare il neonato con Kanmed BabyWarmer dal momento in cui le condizioni del neonato sono stabili e sono necessari solo minimi interventi clinici, come ad esempio un leggero supporto ventilatorio.

Scegliere il tipo di materasso adeguato per le esigenze del bambino.

Inserire il Pad Riscaldante nella tasca sotto il materassino. Inserire il materassino nel nido Kanmed BabyNest.

Premere il tasto di accensione e regolare la temperatura.

Quando lo smiley sull'unità di controllo diventa verde, il materassino ha raggiunto la temperatura impostata ideale per il bambino

BENEFICI

- Facilita in modo ottimale la crescita
- Facile da usare e da pulire per gli operatori
- In comparazione all'uso di un'incubatrice i costi sono considerevolmente inferiori

CONFIGURA IL TUO KANMED BABYWARMER

I differenti formati dei nidi, nidi monouso, materassini ad acqua etc. rendono semplice ed efficace l'uso del BabyWarmer per il bambino e per la routine dell'ospedale.



BW3-001 KANMED BABYWARMER STANDARD COMPLETO COMPOSTO DA:

BW3-020 Unità di Controllo
BW-50-003 Materassino ad Acqua
BW-50-029-1 Bottiglia di Anti Alghe
BW3-003 Pad Riscaldante a bassa tensione
BW-50-025 Nido Baby Nest (2)
699-1171 Cavo di Alimentazione
BW3-0xx Manuale d'uso
Opzionale: Materassino in Gel o Gommapiuma



BW3-020 UNITÀ DI CONTROLLO

Nuovo design con display di facile e rapida lettura. Il nuovo BabyWarmer offre 3 possibilità di riscaldamento, utilizzando la stessa Unità di Controllo e lo stesso Pad Riscaldante.

1. Il caldo e soffice Materassino ad Acqua Kanmed
2. Il caldo morbido Materassino in Gel speciale
3. Il caldo Materassino in Gommapiuma

Sofisticati sistemi di sicurezza. È inoltre possibile collegare un sensore standard YSI per il controllo della temperatura cutanea del neonato.

Può essere utilizzato stand alone, agganciato con la sua maniglia o montato su palo.

Alimentazione 100-240 V AC o 12-24 V DC. Peso 1,5 kg, Diametro 14cm, Altezza 21cm. Potenza media assorbita 15W.



BW3-003 PAD RISCALDANTE

A bassa tensione, 24 V CC, 50W, resistente all'acqua, facile da pulire. Non crea campi magnetici o elettrici potenzialmente nocivi - caratteristica unica di Kanmed. Quattro sensori integrati per monitorare costantemente le prestazioni del sistema e la temperatura dell'acqua. Lunghezza: 58 cm, Larghezza: 25 cm, Spessore: 2 mm.



BW3-0837 MORSETTO PER PALO VERTICALE

Per posizionare l'Unità di Controllo BW3 in orizzontale o in verticale rispetto al palo.

KANMED^o BABYWARMER



MATERASSINO AD ACQUA, INFORMAZIONI GENERALI.

Tutti i Materassini ad Acqua Kanmed sono realizzati in morbido e resistente polimero. Sono costruiti con speciali pareti divisorie che riducono il movimento dell'acqua e rimangono comunque sufficientemente flessibili per assecondare i movimenti del bambino. Una bottiglietta di Soluzione Anti Alghe è inclusa e svolge un'attività, clinicamente dimostrata, che mantiene l'acqua pulita fino ad un anno.

BW-50-003 MATERASSINO AD ACQUA

Il Materassino ad Acqua è il più utilizzato. Una volta riempito fino al livello indicato, può contenere fino a 4-4,5 litri d'acqua. Lunghezza : 60 cm, Spessore: 27 cm

BW-50-015 MATERASSINO AD ACQUA GEMELLARE


Speciale Materassino ad Acqua per gemelli o bambini più grandi. Può essere mantenuto caldo tramite un solo Pad Riscaldante. Riempito fino al livello indicato, può contenere circa 10 litri d'acqua. Lunghezza: 60 cm, Larghezza 60 cm

BW-50-010 MATERASSINO AD ACQUA PER KANMED BABYBED

Speciale Materassino ad Acqua che copre la maggior parte del lettino Kanmed BabyBed (BB-1 o BB-3). Può essere mantenuto caldo con un solo Pad Riscaldante. Riempito fino al livello indicato, può contenere circa 9 litri d'acqua. Lunghezza: 60 cm, larghezza: 40 cm.

BW3-099 SENSORE TEMPERATURA CUTANEA YSI

Il sensore per la temperatura cutanea viene collegato all'Unità di Controllo. La temperatura misurata con gli allarmi di minima e di massima vengono automaticamente mostrati. Il sensore di temperatura non controlla il riscaldamento del bambino.

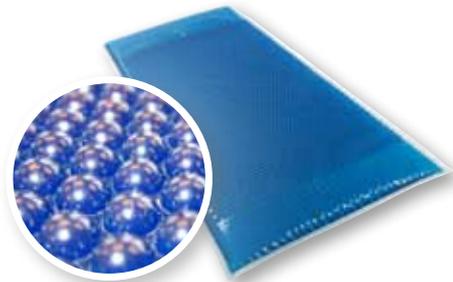

GE-602815 MATERASSINO IN GEL CON TASCA

Il Materassino in Gel Kanmed è stato studiato appositamente per l'uso con il BabyWarmer BW3. Il Materassino in Gel ha una speciale superficie a semisfere che lo rende morbido e confortevole per il bambino. Integra una tasca per inserire il Pad Riscaldante. Se per qualche motivo non è possibile utilizzare il Materassino ad Acqua, quello in Gel è una valida alternativa. Si inserisce nel Nido BabyNest BW-50-025. 60 x 28x 1.5 cm.



BW3-203 MATERASSINO IN GOMMAPIUMA CON TASCA

Questo Materassino in Gommapiuma è molto morbido e facile da pulire, destinato ai bambini nati a termine, offre un riscaldamento confortevole. Non è studiato per la crescita dei neonati prematuri. Ha una tasca per poter inserire il Pad Riscaldante. 60 x 28 cm.

BW-50-029 ANTI ALGHE

Utilizzo consigliato per Materassini ad Acqua, testato clinicamente, impedisce lo sviluppo di alghe e batteri all'interno del materassino. Può mantenere l'acqua pulita per un anno. Da utilizzare ogni volta che l'acqua viene cambiata o rabboccata. Confezione da 20 bottiglie.



KANMED° BABYWARMER



BW-50-025 E BW-50-025-XL

NIDI KANMED BABY NEST

Kanmed Baby Nest è un nido completo e riutilizzabile. Basta far scorrere il Materassino ad Acqua assieme al Pad Riscaldante nell'apposita tasca. Il Baby Nest è destinato a offrire un ambiente confortevole intorno al bambino e facilitarne la corretta posizione fisiologica. Temperature di lavaggio: 60° C. Materiale della copertura: cotone, Imbottitura: Fibra di poliestere, Baby Nest lunghezza: 65 cm, larghezza: 35 cm

Altezza: 6 cm, Misura interna: 40 cm

BW-50-025 Baby Nest azzurro

BW-50-025-P Baby Nest rosa

BW-50-025-Y Baby Nest giallo

BW-50-025-XL BABY NEST XL

Il Kanmed Baby Nest XL è destinato ai bambini più grandi, fino a 4500 g. Lunghezza: 65 cm, Larghezza: 35 cm, Altezza: 6 cm, Misure interne: 60 cm



BW-50-027 BABY NEST GEMELLARE

Per l'uso con il Materassino ad Acqua gemellare art no: BW-50-015 o per due Materassini ad Acqua standard. lunghezza: 65 cm, Larghezza: 55 cm, Altezza: 5 cm. (Solo di colore azzurro)



BW-50-250 COPERTURA MONOUSO PER BABY NEST

Molto bello, lenzuolino realizzato in morbido tessuto non tessuto, pronto e facile da applicare al BabyNest. Ha la base idrorepellente. Mira a tutelare sia i nidi riutilizzabili che quelli monouso. Lunghezza: 60 cm, Larghezza 85 cm. Confezione da 100 pezzi.



BW-50-200 BABY NEST MONOUSO

Realizzato in tessuto non tessuto. Lunghezza: 65 cm, Larghezza: 35 cm. Misura interna: 40 cm. Confezione da 10 pezzi.



BW3-007 CAVO BATTERIA

Per collegare l'Unità di Controllo ad una batteria 12V DC, per l'uso in auto o simile. Dotato di una presa universale accendisigari, per l'uso in trasporto.



LA MODERNA CULLA DA OSPEDALE BABYBED GARANTISCE ERGONOMIA EFFICIENTE

La culla Kanmed fornisce la miglior postazione di cura per neonati prematuri e neonati in terapia intensiva e sub-intensiva. L'accogliente culla è stata sviluppata in collaborazione con infermieri neonatologi per garantire un'elevato livello di ergonomia. L'altezza del lettino è regolabile elettricamente e le pareti sono trasparenti e facili da ripiegare così da rendere più facile l'accesso al bambino. Gli angoli in morbido silicone permettono di appoggiare

e riposare le braccia durante le manovre di cura. Il lettino è dotato di una tendina che riduce l'esposizione alla luce, all'aria condizionata ed ai rumori. La maggior parte delle culle Kanmed BabyBed è dotata di Kanmed BabyWarmer. Insieme formano una moderna stazione di cura all'interno dei reparti di Terapia Intensiva Neonatale, di Maternità, Nidi e Sale Parto. Kanmed BabyBed e Kanmed BabyWarmer sono usati in tutto il mondo.

KANMED BABYBED E' DISPONIBILE IN TRE VERSIONI:

(Il BabyBed mostrato di seguito può essere equipaggiato con KANMED BABYWARMER ordinabile separatamente)



BB-1, KANMED BABYBED

L'unità completa comprende:

Regolazione elettrica dell'altezza, materassino, tenda (modello BB-21/3) con palo per la tenda, mensola, cavo di alimentazione, pareti laterali pieghevoli da 19cm (disponibili anche da 24 cm).



**BB-3, KANMED BABYBED
ALTEZZA FISSA**

L'unità completa comprende:

Materassino, tenda (modello BB-21/3), palo per la tenda, mensola, pareti laterali pieghevoli da 19cm (disponibili anche da 24 cm).



**BB-4, KANMED BABYBED
GEMELLARE**

L'unità completa comprende:

Regolazione elettrica dell'altezza, materassino, tenda (modello BB-22/3), palo per tenda, mensola, cavo dell'alimentazione, pareti laterali alte pieghevoli da 24 cm. Può ospitare due Kanmed BabyWarmer completi o un BabyWarmer Gemellare completo di Materassino Gemellare e Nest Gemellare.

ART. NO.	BB-1	BB-3	BB-4
DESCRIZIONE E COLORE:	Letto Standard. Azzurro.	Letto ad altezza fissa. Azzurro.	Letto gemellare. Azzurro.
INCLUDE:	Materassino, tenda, palo tenda, mensola, pareti laterali da 19 cm (per versione gemellare 24 cm), cavo alimentazione (BB-1 & BB-4), manuali e imballaggio per il trasporto.		
DIMENSIONI:	760 mm x 560 mm	760 mm x 560 mm	850 mm x 700 mm
SUPERFICIE DEL LETTINO DIMENSIONI/ALTEZZA:	665 mm x 445 mm/70 cm-99 cm	665 mm x 445 mm/Fixed at 80 cm	765 mm x 640 mm/70 cm-99 cm
PESO:	Circa 33 kg	Circa 25 kg	Circa 40 kg
BASE SU RUOTE:	700 mm x 500 mm. Ruote: diametro 125 mm. Ruote anteriori dotate di freni. Inclinazione: ≈ 22°		
MATERASSINO:	Poliestere con copertura in PVC. (665 x 445 x 40 mm)	Poliestere con copertura in PVC. (665 x 445 x 40 mm)	Poliestere con copertura in PVC. (665 x 445 x 40 mm)
TENDA:	Cotone e poliestere. Lavabile a 60° C (tutti i modelli)		
MENSOLA:	Min 400 mm x 400 mm. Tutti i modelli. Carico massimo 10 kg		
ALIMENTAZIONE:	100-240 Vac, 50/60 Hz	N/A	100-240 Vac, 50/60 Hz
CONSUMO ENERGETICO:	100 VA	N/A	100 VA
CONFORMITA': TUTTI I LETTI HANNO IL MARCHIO CE	SS EN 60 601. Conforme a MDD.	Conforme a MDD.	SS EN 60 601. Conforme a MDD.


DATI TECNICI

ACCESSORI KANMED BABYBED:



BB-101 SISTEMA CASSETTO

Il sistema cassetto è montabile dietro il lettino. Completo di due capienti cassette in plastica (13 litri ciascuno) e una staffa di montaggio.

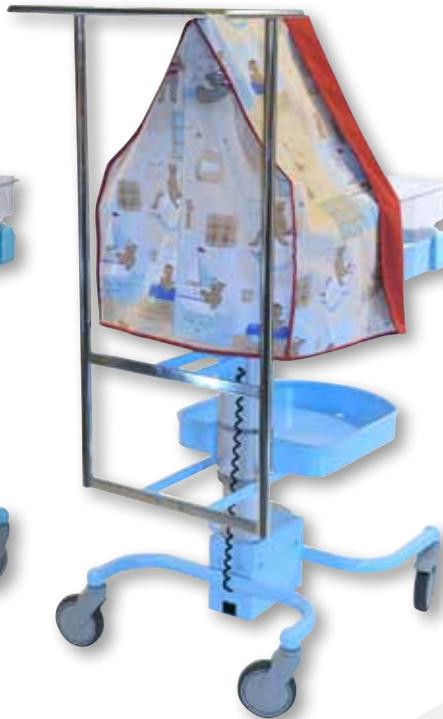

BB-102 MENSOLA POSTERIORE COMPLETA

Pali verticali 25 mm, 2 binari orizzontali 10 x 25 mm, 1 mensola superiore 500 x 300 mm. Completo di staffe e viti.



BB-TENDE

Sono disponibili tende in colori differenti. Scegliete colore e disegni su www.Kanmed.se



700-0743 SUPPORTO PER BOTTIGLIE

Staffa in acciaio Inox, supporto per bottiglie di disinfettante. Diametro massimo 70-80 mm.



KIT TENDA PER CULLA

Si inserisce in una qualsiasi culla standard. Larghezza minima del lettino 34 cm. La tenda può ruotare per essere spostata dalla culla. La base è sostenuta dal materasso.



700-0750 CAVO ALIMENTAZIONE

Cavo speciale per alimentare insieme Kanmed BabyBed e Kanmed BabyWarmer.



700-0829 MANIGLIA

Per facilitare lo spostamento del lettino o per agganciare accessori vari.

CONCLUSIONI

Kanmed BabyWarmer e Kanmed BabyBed permettono di dimettere precocemente il neonato prematuro dall'incubatrice al fine di poter iniziare subito l'importantissimo processo di legame tra madre e figlio utilizzando le tecniche di bonding e marsupio terapia.



KANMED^o BABYWARMER

Kanmed AB

Gårdsfogdevägen 18B | SE-168 66 BROMMA | SWEDEN

Tel +46 8 56 48 06 30 | Fax +46 8 56 48 06 39

info@kanmed.se | www.kanmed.se