


KANMED^o BABYBED

Korisnički priručnik

BB100-401F-090 ver. 5 HR 2020-03-25

Korisnički priručnik

KANMED^o BABYBED

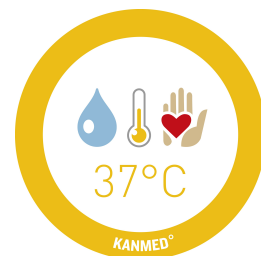

Oznaka artikla:
BB100-401F-090 ver. 5 HR
2020-03-25

Oprez

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik.
Nepravilna upotreba može uzrokovati
ozljedu bolesnika ili korisnika.



Proizvođač:

Kanmed AB
www.kanmed.se

Distributer:

Ovaj priručnik odnosi se na sve Kanmed BabyBed dječje krevetiće isporučene od 2017. godine.

Sadržaj

1. NAMJENA.....	3
2. UPOZORENJA	3
3. OPIS SIMBOLA	4
4. UPUTE ZA UPOTREBU	5
5. ČIŠĆENJE	9
6. SUŠTAVNE PROVJERE PRIJE UPOTREBE	10
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA	10
8. TEHNIČKI PODACI	11
9. TEHNIČKI DIO PRIRUČNIKA - SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE	12
10. REZERVNI DIJELOVI / OPREMA	13
11. JAMSTVENA IZJAVA.....	15
12. SMJERNICE O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI	15
13. ODLAGANJE	15

BB101 Standardni bez prečki BB100 Standardni s prečkama BB400 Za blizance, s prečkama



1. Namjena

Namjena




Dječji krevetić Kanmed BabyBed pruža idealan ergonomski i siguran krevetić za nedonoščad i novorođenčad u bolničkom okruženju. Namjena mu je i upotreba zajedno s grijaćim sustavima Kanmed BabyWarmer BW3 ili BW-50.

Namijenjen je za upotrebu od strane bolničkog osoblja ili njegovatelja novorođenčeta u skladu s uputama iz ovog priručnika i u skladu s vašim uspostavljenim rutinskim kliničkim postupcima. Proizvod smiju upotrebljavati isključivo osobe osposobljene za upotrebu dječjih krevetića Kanmed BabyBed.

2. Upozorenja

- Kanmed BabyBed nemojte upotrebljavati za bebe i malu djecu koja se mogu kretati uslijed čega bi mogla pasti ili izaći iz kreveta.
- Provjerite jesu li stjenke krevetića blokirane u najvišem položaju dok dijete nije pod nadzorom.
- Nikad ne pomičite krevetić dok je u najvišem položaju. Uvijek upotrebljavajte najniži položaj.
- Ne upotrebljavajte stjenke krevetića za njegovo pomicanje - uvijek, ovisno o modelu, upotrebljavajte prečke ili prednju dršku.
- Ne ostavljajte dijete bez nadzora dok su stjenke krevetića spuštene.
- Poštujte ograničenja težine.
- Provjerite da krevet nije labav, odnosno da su svi kotači i vijci čvrsto zategnuti.
- Pri promjeni visine provjerite da na putanji nema ljudi ni predmeta.
- Ako se krevetić upotrebljava bez baldahina skinite stup za baldahin.
- Stup za baldahin namijenjen je za isključivo za baldahin
- Isključite napajanje ako postoji opasnost da bi djeca, rođaci, drugi bolesnici ili bolesnici s posebnim potrebama mogli pritisnuti pedal ili se njome igrati. Ako je pritom spojen Kanmed BabyWarmer, vodite računa da i dalje ima napajanje.
- Zadržite sigurnu udaljenost od drugih proizvoda koji se mogu podizati ili spuštati.
- Maksimalna debljina madraca je 40 mm.
- Proizvod smiju upotrebljavati isključivo osobe osposobljene za upotrebu dječjih krevetića Kanmed BabyBed.

3. Opis simbola

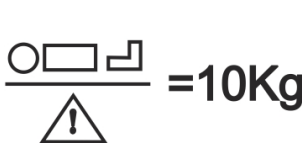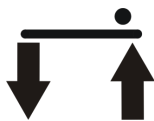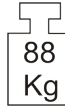	Prije upotrebe pročitajte korisnički priručnik.		
Dostupni modeli:			
BB100	Standardni krevetić	BB101	Isto, ali bez prečki
BB400	Krevetić za blizance	BB401	Isto, ali bez prečki
BB300	Standardni krevetić fiksne visine	BB301	Isto, ali bez prečki
BB400F	Krevetić za blizance fiksne visine	BB401F	Isto, ali bez prečki
Maksimalno dopušteno sigurno radno opterećenje:			
 			
Korito krevetića, sve verzije: Dojenčad ukupne tjelesne težine 10 kg + vodeni madrac(i), gel madraci ili drugi madraci, ukupno 10 kg			
Poklopac kutije za pohranu ispod podnice kreveta: 2kg			
Kutija za pohranu ispod podnice kreveta: 2kg			
Prečke oko kreveta: max. 3,5 kg na svaku prečku max. ukupno 10 kg na sve prečke			
Polica: 5kg Stupovi za stražnju montažu: 3 kg svaki			
Prednja drška: 5 kg (modeli bez prečki)			
	Simbol na pedali za dizanje i spuštanje podnice kreveta (ne odnosi se na modele BB300,301 i BB400F, 401F)		
	Simbol za funkciju nagiba, nalazi se na oznaci korita krevetića		
	U skladu s Direktivom 93/42 EEZ o medicinskim proizvodima		
	Spojna točka za uzemljenje		
IP 30	Stupanj zaštite (od prodora vode i stranih čestica)		
	Tip B stupnja zaštite (konstrukcija) (ne odnosi se na modele BB300,301 / BB400F,401F)		
	Po isteku vijeka trajanja krevetića, treba ga vratiti distributeru na recikliranje u skladu s EU Direktivom 2002/96/EZ o otpadnoj opremi (WEEE), ako je primjenjivo.		
 20XX	Godina proizvodnje	 9min/h	Maksimalno trajanje neprekidne upotrebe električnog stupa
 88 Kg	Ukupna masa krevetića opterećenog maksimalnim dopuštenim opterećenjem		
	Rizik od ozljede šake		

4. Upute za upotrebu

4.1 Prvo čišćenje

Kanmed BabyBed krevetić i njegova oprema moraju se čistiti u skladu s rutinskim postupcima u vašoj zdravstvenoj ustanovi.

Prije stavljanja bolesnika u krevetić pročitajte poglavlje 5. **Čišćenje**.

Način ugradnje stjenki krevetića, itd. naveden je u poglavlju 5.

4.2 Provjera stabilnosti

Provjerite jesu li vijci pravilno zategnuti i je li krevetić stabilan.

4.3 Spuštanje stjenki krevetića

Bočne stjenke i prednja stjenka spuštaju se na sljedeći način.

Objema rukama uhvatite gornje rubove.


Povucite ravno gore (5mm) – povucite prema sebi (2 cm) – lagano gurnite dolje.

Objema rukama ponovno povucite stjenke krevetića prema gore - gurnite malo naprijed i zatim ih spustite. Provjerite jesu li čvrsto uglavljene.

Provjerite pomiču li se sve stjenke krevetića pravilno i jesu li u dobrom stanju.

NAPOMENA: Vodite računa da se pri spuštanju i podizanju stjenki krevetića ništa ne zaglavi.

NAPOMENA: Skidanje stjenki krevetića - vidjeti poglavlje 5. **Čišćenje**

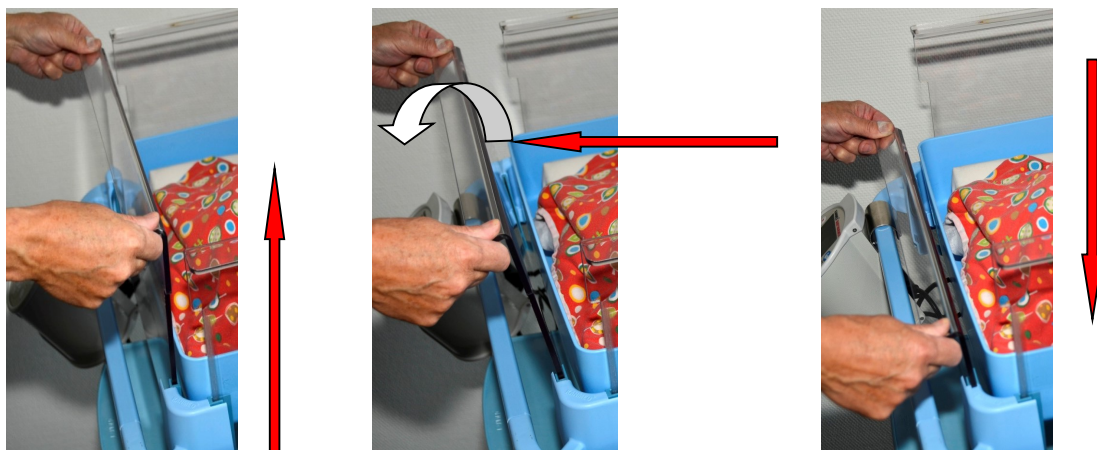

4.4 Pomicanje kreveta

Za pomicanje krevetića uvijek upotrebljavajte prečke ili prednju dršku.

Upozorenje: Pri pomicanju ili premještanju krevetić mora biti na nižem položaju, posebice ako je dijete unutra.

Napomena:

- Za pomicanje krevetića ne upotrebljavajte stjenke.
- Ne zaboravite prije pomicanja isključiti sve kabele iz napajanja.
- Ako ne planirate pomicati krevetić, aktivirajte kočnice na kotačima.

4.5 Priključivanje krevetića na napajanje (ne odnosi se na modele BB300/301 i BB400F/401F)

Krevetić se mora priključiti na uzemljenu utičnicu uzemljenim kabelom.

Provucite kabel tako da nitko za njega ne može zapeti niti pasti preko njega.

NAPOMENA: Jedini način prekida napajanja je isključenje kabela na podnožju stupa ili iz zidne utičnice.

Postavite krevet tako da se kabel može lako isključiti.

UPOZORENJE: Radi izbjegavanja rizika od strujnog udara, oprema se smije priključiti isključivo na utičnicu koja je uzemljena.



4.6 Namještanje visine (ne odnosi se na modele BB300/301 i BB400F/401F)

Visina se može namještat i pritiskom pedale na podnožju kotača.

Priključite napajanje i pomičite krevet prema gore i dolje kako biste se uvjerali da se nesmetano pomiče bez neobičnih zvukova.

Može se čuti motor, što je pokazatelj/upozorenje da se pomiče podnica kreveta.

Pedale se mogu ugraditi s lijeve ili s desne strane ili s obje strane. Dostupna je i prednja pedala.



UPOZORENJE:

Pri promjeni visine vodite računa da kretanje krevetića ne sprječava nijedna osoba, kabel ni drugi predmeti i da između stupa i podnožja kotača ili drugdje nije zaglavljen niti omotan nikakav kabel. Isključite napajanje ako postoji opasnost da bi djeca, rođaci ili bolesnici mogli pritisnuti pedalu ili se njome igrati. Vodite računa da Kanmed BabyWarmer i dalje ima napajanje.

Pri aktivaciji električnog namještanja visine ne blokirajte pokrete.

4.7 Nagib

Pri naganjanju kreveta objema rukama čvrsto držite prednju prečku ili dršku i pritisnite gumb za otpuštanje ispod desnog kuta krevetića.

Istovremeno pritisnite krevetić prema dolje ili ga povucite prema gore dok ne postignete željeni nagib.


Pri otpuštanju gumba krevetić bi trebao ostati u željenom položaju odnosno pod željenim kutom.

Tehničar može ograničiti maksimalni kut nagiba. Vidjeti tehnički odjeljak.

Dostupan je i komplet za nadogradnju funkcije nagiba do +/- 17 stupnjeva, položaj Trendelenburg. Broj artikla BB173.



Gumb za nagib na modelima bez prečki

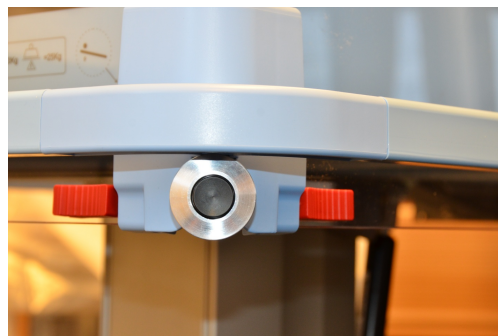

Gumb za nagib na modelima s prečkama

4.8 Stup za baldahin, baldahin i madrac

Postavite stup za baldahin u stražnji držač.

Okrenite ga tako da stoji pod kutom od 90 stupnjeva u odnosu na krevet i pritisnite ga tako da vijci mogu proći kroz utor.

U unutrašnjosti baldahina je utor.


Provucite stup baldahina kroz utor i učvrstite ga te postavite stranice baldahina s vanjske strane stjenki krevetića.

Postavite madrac u krevetić.

Upotreba drugih tipova madraca i baldahina kućne izrade može poništiti zakonsku odgovornost proizvođača.



NAPOMENA: Stup za baldahin ima dva položaja po visini. Provjerite upotrebljavate li odgovarajući stup za baldahin.

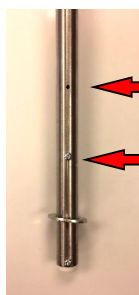

← Položaj zaustavnog vijka kod modela B100/101/300/301


← Položaj zaustavnog vijka kod verzija krevetića za blizance

4.9 Korito za dijete

Korito za dijete može se učvrstiti na podnicu krevetića ili biti nepričvršćeno, ovisno o narudžbi.

Ako je korito nepričvršćeno, možete ga podignuti, što omogućuje lakše čišćenje samog korita kao i podnice krevetića.

Ako želite da korito za dijete bude trajno pričvršćeno na podnicu krevetića, Kanmed može isporučiti posebnu traku za tu namjenu.

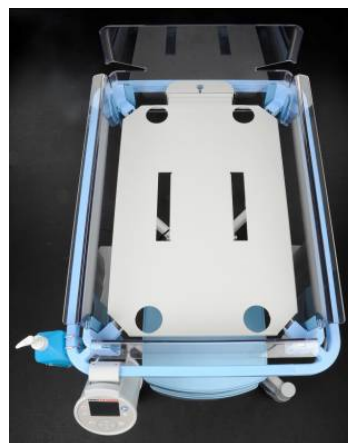

4.10 Kutije za pohranu

Ispod podnice krevetića mogu se ugraditi kutije za pohranu s poklopcem ili bez njega.

One se mogu okretati radi lakšeg pristupa.

Nakon upotrebe okrenite ih i vratite na mjesto.

Pridržavajte se ograničenja opterećenja navedenih na poklopcu i u kutijama za pohranu.



4.11 Grijač Kanmed BabyWarmer

Upravljački uređaj za Kanmed BabyWarmer obično se nalazi na šipci ispod krevetića, gdje je namjestivi držač.

Kanmed BabyWarmer može se ugraditi na krevetić i na druge načine. Vidjeti www.kanmed.se, BabyBed, Downloads, dokument pod nazivom „possible ways ...“.

Kabel grijače podloge po mogućnosti treba provući kroz jedan od utora unutar korita krevetića prije priključivanja na upravljački uređaj.



4.12 Kabel napajanja grijača BabyWarmer

Kanmed BabyWarmer priključen je na napajanje vlastitim kabelom ili posebnim kratkim kabelom (broj za narudžbu 800-0502), koji je priključen na gornje podnožje stupa - vidjeti sliku - Dodatne podatke o upotrebi grijača Kanmed BabyWarmer potražite u korisničkom priručniku za grijač.



4.13 Komplet za ugradnju straga

Svi noviji krevetići opremljeni su držačem za ugradnju straga. Stupovi s vijcima su u priboru i radi se o standardnim cijevima od nehrđajućeg čelika promjera 25 mm.

Brojevi za narudžbe u poglavlju su 10.


Maksimalna težina na pojedinom stupu: 3 kg



4.14 Dodatna polica

Polica se može naručiti umjesto kutija za pohranu.

Oznaka artikla: 800-0530

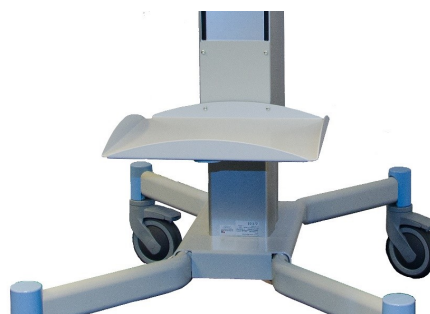

4.15 Ostala oprema

Kanmed oprema ugrađuje se i upotrebljava u skladu s uputama dostavljenima s pojedinim dijelovima. Pridržavajte se ograničenja težine navedenih u poglavlju 3.

Prije dodavanja druge opreme potrebno je pažljivo uzeti u obzir ograničenja težine, primjerenost, povezivanje s krevetićem, itd. Kanmed odgovara samo za opremu isporučenu od Kanmeda.

Svu opremu koju proizvodi Kanmed potražite na www.kanmed.se ili se obratite svom distributeru.

5. Čišćenje

Opći podaci

Krevetić i opremu treba temeljito očistiti između dva bolesnika. Pridržavajte se rutinskih postupaka koje utvrdi osoba odgovorna za čišćenje i dezinfekciju u bolnici i na vašem odjelu.

Prije i nakon čišćenja provjerite ima li istrošenih dijelova i jesu li svi dijelovi dovoljno čvrsti.

U nastavku je popis sredstava za čišćenje i dezinfekciju koje preporučuje Kanmed. Upotreba drugih sredstava i/ili pretjerano čišćenje mogu skratiti vijek trajanja svih ili nekih dijelova. Ako niste sigurni obratite se Kanmedu sa specifikacijom proizvoda.

Stjenke krevetića izrađene su od polietilena (ekološkog) i mogu podnijeti sve vrste sredstava za čišćenje i dezinfekciju.

Ne upotrebljavajte bjelila ni otapala.

Čišćenje: Upotrijebite vodu i sapun

Dezinfekcija: Krevetić Kanmed BabyBed može podnijeti uobičajena sredstva za dezinfekciju površina koja se koriste u bolnicama. Dezinfekcijske krpice sa sredstvima Virkon[®], Diversey Limpiador Clorado, Clinell wipes, Chlor Clean wipes, Meliseptol[®] rapid, Dax yt, Terralin[®], Dsimozon[®] pur, perform[®] i slično. Ako niste sigurni, iskušajte sredstvo na maloj površini ili se obratite svom distributeru ili Kanmedu.

POSEBNI PODACI

5.1 Čišćenje krevetića

Dobro iscijedite krpice.

Napomena: Krevetić Kanmed BabyBed ne smije se prskati nikakvom tekućinom.

Ne čistite ga u dezinfekcijskim komorama.

5.2 Korito za dijete

Korito za dijete obično nije pričvršćeno. Stoga se može podići radi lakšeg čišćenja samog korita, kao i podnice krevetića.

5.3 Čišćenje stjenki krevetića



Skidanje stjenki krevetića.

Za deblokadu stjenke gurnite crvene zaustavljače prema naprijed i podignite stjenku.

Za blokadu stjenke krevetića gurnite crveni zaustavljač prema van.

Nemojte prati stjenke krevetića u perilici suđa.

Ne trljajte stjenke abrazivnim materijalom.

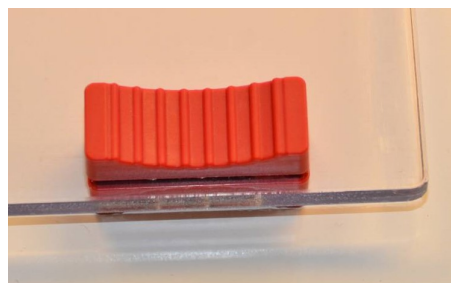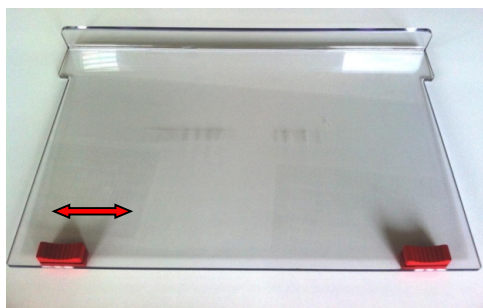

5.4 Vraćanje stjenki krevetića na mjesto

Klizanjem postavite stjenke krevetića na svoje mjesto i gurnite crvene zaustavljače prema van.

Preklopljeni gornji rub stjenke bit će okrenut prema van.

5.5 Kutije za pohranu i poklopci

Kutije za pohranu i poklopci čiste se i dezinficiraju jednako kao i ostatak krevetića.

5.6 Madrac

Upotrebljavajte sredstva za čišćenje i dezinfekciju površina koja preporučuje Kanmed, kao što je ranije navedeno.

5.7 Baldahin

Upute za pranje potražite na oznaci.

U slučaju kontaminacije baldahin se može prati na 90°C, ali to može dovesti do skupljanja i ranije istrošenosti.

6. Sustavne provjere prije upotrebe

Općenito

Provjerite jesu li svi dijelovi u dobrom stanju, da nisu izbljedeni i da na njima nema pukotina.

Zamijenite dijelove koji nisu u dobrom stanju.

Potrebno je i dodatno godišnje održavanje. Vidjeti tehnički odjeljak.

Preporučene provjere prije upotrebe	Tko vrši provjeru	Raspored provjera	Dodatni podaci
Funkcija stjenki krevetića	Korisnik	Prije svake upotrebe	Provjerite pomiču li se stjenke prema gore i prema dolje lako i blokiraju li se u gornjem položaju.
Nagib	Korisnik	Prije svake upotrebe	Provjerite miče li se krevetić slobodno i blokira li se sigurno pod svakim željenim kutom.
Kabeli i spojevi	Korisnik	Svaki dan	Provjerite jesu li u dobrom stanju
Stabilnost i cjelovitost	Korisnik	Svaki dan	Provjerite je li krevetić u dobrom stanju i stabilan i rade li ispravno sve funkcije
Grijač Kanmed BabyWarmer	Korisnik		Vidjeti korisnički priručnik grijača Kanmed BabyWarmer
Kotači / kočnice	Korisnik	Prije svake upotrebe	

7. Rješavanje problema

Simptom	Mogući uzrok	Radnja
Podizni stup ne pomiče se kako treba. (ne odnosi se na modele BB300,301 i BB400F, 401F)	Nema napajanja	Provjerite kabele. Provjerite utičnicu.
	Nešto ometa kretanje.	Provjerite da ga ništa ne blokira.
	Električni priključak je neispravan ili nije pravilno spojen.	Tehnička služba
	Pedala je neispravna ili kabel nije spojen.	Tehnička služba
Ne možete pravilno nagnuti krevetić. Zaglavljuje se u krajnjim položajima. Ne zadržava se u položaju.	Upravljanje je neispravno ili ga treba namjestiti.	Tehnička služba
	Nešto ga ometa.	Provjerite da ga ništa ne blokira.
Krevetić vam se čini nestabilnim.	Olabavljeni vijci ili kotačići	Tehnička služba
Pri namještanju visine pojavljuju se čudni zvukovi.		Tehnička služba
Stjenke krevetića teško se pomiču.	Nisu pravilno postavljene.	Provjerite kako ih pravilno postaviti.

8. Tehnički podaci

	BB100 / 101 Standardna verzija BB300 / 301 Fiksna visina		BB400 / 401 Verzije za blizance BB400F / 401F Fiksna visina	
Vanjske dimenzije	S prečkama d 85 cm, š 63 cm	Bez prečki d 83cm, š 53 cm	S prečkama d 95 cm, š 80 cm	Bez prečki d 93 cm, š 70 cm
Korito krevetića Unutarnje dimenzije	d 690 mm, š 465 mm, v 90 mm Izrađeno od polipropilena		d 765mm, š 640mm, v 90mm Izrađeno od polipropilena	
Visina dna korita krevetića od poda	min. 78 cm, max. 108 cm. Fiksna visina je 80 cm Narudžba dvostrukih kotačića 9,5 cm spušta sve krevetiće za otprilike 4 cm.			
Masa	Oko 46 kg U slučaju fiksne visine, oko 36 kg		Oko 52kg U slučaju fiksne visine, oko 42 kg	
Baza kotača	64 cm X 87 cm			
Kotači	Promjer 125 mm s kočnicama ili 9,5 cm dvostruki kotači s kočnicama			
Nagib	Oko 17 stupnjeva Opcija ±17 stupnjeva			
Madrac	Obložen mekanom pjenom			
Baldahin	Periv na 60°C (90°C)			
Kutija za pohranu	d 320mm, š 330 mm, v 120mm, poklopac 320x330 mm			
Boje	Uniseks svjetlo plava boja svih plastičnih detalja Kotači i metalni dijelovi svijetlosive boje			
Napon BB100/400	230 V 50 Hz / 60 Hz ili 115 V 60 Hz, 150 VA			
Osigurači BB100/400	2xT6, 3A 230V. Zamijeniti isključivo osiguračima istog tipa i vrijednosti.			
Utičnica na stupu modela BB100/101 i BB400/401: max. 300 W				
Zaštita BB100/101/400/401: Klasa I.				

Preinake UPOZORENJE	Sve preinake krevetića Kanmed BabyBed, uključujući i opremu kućne izrade, mogu potpuno poništiti Kanmedovu odgovornost i nisu dopuštene osim uz Kanmedovo pisano dopuštenje.
Izrada sustava	Svaka osoba koja krevetić Kanmed BabyBed priključi na napajanje drugog sustava može time dovesti do nastanka „sustava“ iz norme IEC 60601-1, poglavlja 16. i mora biti kvalificirana za procjenu posljedica, koje mogu dovesti do ozljede osoblja i bolesnika te oštećenja opreme.
Očekivani vijek trajanja	Kanmed jamči siguran vijek trajanja od 10 godina od dana prve upotrebe. Uvjet je pritom da se krevetić Kanmed BabyBed servisira u skladu s korisničkim i/ili servisnim priručnikom i da se na proizvodu ne vrše nikakve preinake ni promjene iz bilo kojeg razloga.

Proizvod nosi oznaku CE.

U skladu je s normom UL 60601-1

Podaci o okruženju

Pri uporabi: +10 do +40°C, <85% relativne vlažnosti

Tijekom transporta: -20 do +60°C, bez kondenzacije

Tijekom pohrane: +10 do +40°C, bez kondenzacije

Atmosferski tlak: 70 do 106 kPa

9. Tehnički dio priručnika - Servisiranje i održavanje

NAPOMENA: Sve rezervne dijelove koji se koriste za zamjenu ili popravke mora isporučiti Kanmed ili njegov ovlašten distributer. Upotrebom dijelova koje „nije odobrio Kanmed“ automatski se sva odgovornost za sigurnost proizvoda prenosi na bolnicu. Popravke smije vršiti isključivo kvalificirano osoblje, biomedicinski inženjer ili jednakovrijedan stručnjak. Nemojte servisirati krevetić dok je bolesnik u njemu.

9.1 Godišnje provjere / održavanje

Najmanje jednom godišnje izvršite sljedeće provjere:

- Provjerite jesu li kabeli i spojevi ispravni.
- Provjerite ima li na stjenkama krevetića pukotina ili oštećenja.
- Provjerite rubove - ima li pukotina u plastici, jesu li vijci zategnuti? Napomena, posebni plastični vijci.
- Provjerite vodilice stjenki, ako su potrebne za predmetni model.
- Provjerite podižu li se i spuštaju stjenke nesmetano i mogu li se lagano odvojiti.
- Provjerite reagira li pedala za upravljanje visinom stupa bez odgode, provjerite radi li ispravno funkcija podizanja i spuštanja i ne proizvodi li neobične zvukove pri radu te jesu li kabeli neoštećeni.
- Provjerite radi li ispravno funkcija nagiba. Ne bi smjela proizvoditi nikakve zvukove.
- Provjerite je li žica do plinske opruge i drške za nagib neoštećena.
- Provjerite jesu li kotači pričvršćeni na nosač i jesu li neoštećeni, okreću li se bez ikakvih zvukova i radi li pravilno funkcija blokade kotača.
- Provjerite jesu li svi vijci pravilno pričvršćeni, posebice oni koji spajaju stup za namještanje visine s podnožjem kotača, vijci na vrhu stupa, vijci koji drže podnicu krevetića i plinsku oprugu.
- Provjerite da oznaka na pedali nije istrošena.
- Provjerite da oznake korita krevetića nisu istrošene.

Servisiranje

NAPOMENA

Uvijek prije popravka krevetića isključite napajanje.

Uvijek nakon popravka ispitajte sve funkcije.

9.2 Namještanje otpuštanja funkcije nagiba / plinske opruge

Hidrauličko otpuštanje nagiba

Ako krevetić ima mehaničko otpuštanje nagiba, podatke o servisiranju potražite u 1. verziji ovog priručnika.

Dostupno na www.kanmed.se.

Vrlo je jednostavno nadograditi ga na hidrauličko otpuštanje nagiba - obratite se svom distributeru.

Pritiskom na gumb aktivirate otpusni klin koji se nalazi na vrhu plinske opruge unutar glave za otpuštanje. Ako se nagib ne pomiče ili nije čvrsto blokiran plinskom oprugom, morate namjestiti funkciju. Otpustite plinski klip iz držača stupa i otpustite blokadnu maticu na glavi za otpuštanje (vidjeti sliku).

Nagib se ne pomiče: Zaokrenite plinsku oprugu za jedan okretaj – umetnite klip u držač i gurnite vijak. Provjerite pomiče li se sad slobodno i blokira li se čvrsto nakon otpuštanja gumba. Ako ne, okrenite za još jedan okretaj.

Nagib se ne blokira: Okrenite plinsku oprugu za jedan okretaj prema van i provjerite. Izvršite konačnu provjeru. Zatim zategnite vijke i blokadnu maticu.



9.2.1 Namještanje ograničenja nagiba

Nagib se može ograničiti pomicanjem držača plinske opruge na stupu prema dolje. Vodite računa da ga pravilno zategnete.

Dostupan je komplet za preinaku raspona nagiba koji omogućuje nagib krevetića za ± 17 stupnjeva.

9.3 Promjena ili namještanje prečke ili kuta

Brojeve pojedinih dijelova provjerite u popisu rezervnih dijelova. Kutovi prečki pričvršćeni su vijcima s donje strane, na svakom kutu s dva (2) posebna plastična vijka. Utori u krevetiću su ovalni, što omogućuje čvrsto namještanje prečki i stjenki krevetića. Uputno je za ugradnju novih kutova ili prečki izvaditi vijke na 2 kuta.

Ne upotrebljavajte nikakve druge vijke osim Kanmed artikla br. 700-0880 jer neće biti dovoljno jaki. Vijak se može otprilike 6 puta umetati u isti plastični utor i vaditi iz njega.

9.4 Dodavanje, vađenje ili namještanje kutija za pohranu ili polica

Olabavite vijke držača kutija za pohranu. (Ako je potrebno, skinite crnu dekorativnu plastičnu traku.) Pomaknite kutiju na novi položaj i pravilno zategnite vijke.

Za skidanje ili dodavanje dodatnog držača kutije: Podignite stup za više od 5 cm. Pritisnite crni plastični okvir oko dna stupa. Sad možete skinuti vijke ili dodati druge.

Pri dodavanju kutija za pohranu vodite računa da se prednja stjenka krevetića može dovoljno spustiti. Odrežite dekorativne crne plastične trake na odgovarajuće dimenzije. Nove trake možete naručiti u Kanmedu.

9.5 Zamjena pedale / električnih spojeva

Pažljivo postavite krevetić bočno. Odvojite pedalu sa stupa. Odvijte pedalu i zamijenite je. Podignite krevetić i provjerite funkcije kao i jesu li pravilno postavljene strjelice za pomicanje gore i dolje.

9.5 1 Dodavanje dodatne pedale ili prednje pedale

Za potrebne upute i dijelove obratite se Kanmedu.

9.6 Zamjena stupa

Električnim putem podignite stup za otprilike 5 cm, ako je moguće.

Isključite napajanje.

Ispraznite krevetić i skinite stjenke krevetića i korito za dijete.

Skinite kutije za pohranu. Pritisnite prema dolje plastični okvir na dnu stupa. Odvojite plastične trake tako da možete skinuti metalne klinove koji drže opremu na stupu. Ako se stup ne može pomaknuti, morate naručiti nove metalne klinove.

Skinite plinsku oprugu sa stupa, kao i njezin držač.

Otpustite vijke koji drže podnicu krevetića. Ova dva vijka su jako zategnuta i za njihovo otpuštanje potrebni su kvalitetni alati i dovoljno snage. Pazite na kabel uzemljenja.

Otpustite vijke na vrhu stupa i skinite držač krevetića. Pazite na kabel uzemljenja s donje strane.

Isključite kontrolu visine.

Okrenite stup / krevetić naopako.

Odvijte spojeve za uzemljenje. (Samo stariji modeli)

Skinite zaštitni kabel uzemljenja ispod krevetića. (Samo stariji modeli)

Otpustite vijke ispod podloge kotača i skinite pedalu.

Odvijte stup. Pazite na kabel uzemljenja.

Za ponovno sklapanje slijedite upute obrnutim redoslijedom.

Provjerite funkcije i sigurnost električnih dijelova i provjerite je li podnica krevetića pravilno uzemljena.

10. Rezervni dijelovi / oprema

NAPOMENA: Dostupna je i brojna druga oprema i rezervni dijelovi. Provjerite kod lokalnog dobavljača ili na Kandmedovoj stranici www.kanmed.si. Za cjenik se obratite svom dobavljaču.

Broj artikla	Proizvod	Dodatni podaci
BB112	Držać grijača BabyWArmer ispod krevetića	Komplet sadrži potpune upute. Na krevetićima proizvedenima prije 2018. potrebno je probušiti metal 7 mm. Treba navesti radi li se o jednostrukom krevetiću ili onom za blizance. Za BW3 treba držać BW3-0837.
800-0116	Stjenka krevetića, stražnja BB101/301	Visina 25 cm. Krevetići bez prečki. Utori za cijevi.
800-0117	Stjenka krevetića, stražnja BB401/401F	Visina 29 cm. Krevetići bez prečki. Utori za cijevi.
800-0118	Stjenka krevetića, stražnja BB100/BB300	Visina 25 cm. Utori za cijevi.
800-0119	Stjenka krevetića, stražnja BB400/400F	Visina 29 cm. Utori za cijevi.
800-0010	Stjenka krevetića, stražnja BB100/BB300	Visina 29 cm, Utori za cijevi
800-0105	Stjenka krevetića, stražnja BB101/BB301	Visina 25 cm. Samo za krevetiće bez prečki. Utori za cijevi.
800-0042	Stjenka krevetića, stražnja BB400/400F	Visina 29 cm, Utori za cijevi
800-0109	Stjenka krevetića, stražnja BB401/401F	Visina 25 cm. Samo za krevetiće bez prečki. Utori za cijevi.
800-0077	Stjenka krevetića, lijeva/desna BB100/BB300	Visina 29 cm.
800-0101	Stjenka krevetića, lijeva/desna BB101/BB301	Visina 25. Samo za krevetiće bez prečki.
800-0079	Stjenka krevetića, lijeva/desna BB400/BB400F	Visina 29 cm.
800-0107	Stjenka krevetića, lijeva/desna BB401/401F	Visina 25. Samo za krevetiće bez prečki.
800-0076	Stjenka krevetića, prednja BB100/BB300	Visina 29 cm.
800-0100	Stjenka krevetića, stražnja BB101/BB301	Visina 25 cm. Samo za krevetiće bez prečki.
800-0078	Stjenka krevetića, prednja BB400/BB400F	Visina 29 cm.
800-0108	Stjenka krevetića, stražnja BB401/401F	Visina 25 cm. Samo za krevetiće bez prečki.
800-0072	Zaustavljač prečke, crveni	Komplet od 4 komada
800-0023	Stjenka krevetića, prednja/stražnja BB100/BB300	Dužina 40 cm.
800-0022	Stjenka krevetića, stranice BB100/BB300	Dužina 62 cm.
800-0044	Stjenka krevetića, prednja/stražnja BB400/BB400F	Dužina 57,7 cm.
800-0045	Stjenka krevetića, stranice BB400/BB400F	Dužina 72,3 cm.
800-0110	Kut BB100-400	Uključena 2 vijka i poklopac pod drškom. Za krevetiće s prečkama
800-0098	Kutna drška BB101-401	Sadrži 2 vijka. Za krevetiće bez prečki
700-0880	Vijci za kutni držać	Za plastične kutove upotrebljavati isključivo ovaj posebni vijak
800-0004	Korito za dijete BB100/BB300	I za model BB101/301
800-0041	Korito za dijete BB400/BB400F	I za model BB401/401F
800-0002	Kutija za pohranu	Za sve modele krevetića
800-0013	Držać kutije za pohranu	Sadrži komplet klinova i vijaka
800-0001	Poklopac kutije za pohranu	Za sve krevetiće
800-0003	Poklopac kotača	Za sve krevetiće
800-0501	Pedala	Za zamjenu. S kabelom i oznakom. Ne sadrži držać.
800-0029	Klin za opremu stupa.	promjer 7 mm, d 30 mm, vijak M5. Sadrži vijak
700-0874	Kotač s vijkom i držaćem, s kočnicom.	Standardno na svim krevetićima
700-0884	Dvostruki kotač, 95 mm, s blokadom	Opcija. Pri narudžbi novog krevetića cijena je 200,- za svaki.
800-0048	Električni stup 230V	Samo za modele BB100 do 401F
800-0526	Električni stup 115 V	Samo za modele BB100 do 401F
800-0506	Plinska opruga	Za krevetiće sa standardnim nagibom +17°
BB172	Hidraulički komplet za nagib	Sadrži hidraulički mehanizam za otpuštanje, gumb, držać i kupolaste vijke. Za nadogradnju krevetića s mehaničkim nagibom.
800-0519	Hidraulički upr. element plinske opruge	Zamjena za neispravno hidrauličko otpuštanje plinske opruge
800-0528	Gumb za otpuštanje (crni)	Paket od 5 komada Mora se pričvrstiti Loctite ljepilom.
700-0879	O-prsten za kutiju za pohranu	
800-0301	Stup fiksne visine (530 mm)	
800-0520	Drška s blokadom	Za upotrebu s modelom 800-0527

11. Jamstvena izjava

Kanmed jamči kupcu da na krevetiću Kanmed BabyBed neće biti nikakvih manjkavosti izrade ni materijala tijekom razdoblja od **5 godina** od datuma isporuke. Ovo jamstvo ne odnosi se na plastične dijelove, madrace, kabele ni baldahine.

Isključiva obveza Kanmeda u odnosu na svaku takvu manjkavost ograničena je na popravak i zamjenu novim ili prerađenim dijelovima ili, po slobodnoj odluci Kanmeda, zamjenu opreme ili povrat kupoprodajne cijene.

Ovo jamstvo ne odnosi se na proizvode koje preinači, namješta ili popravljiva druga strana osim Kanmeda ili organizacija ovlaštenih od Kanmeda ili koji su preinačeni, namještani ili popravljani na načine koji nisu u skladu s Kanmedovim pisanim uputama. Jamstvo ne vrijedi ni ako se oprema pogrešno upotrebljava, kao i u slučaju nemara ili nezgode.

Ova jamstva vrijede pod uvjetom da se o pojavi neispravnosti u jamstvenom roku što ranije obavijesti Kanmed ili njegovi ovlašteni distributeri.

Kanmed ima isključivo pravo utvrđivanja postojanja neispravnosti.

Kanmed ni u kojem slučaju ne odgovara za posebne ili posljedične štete nastale kršenjem jamstva, kršenjem ugovora, nemarom ili drugom sličnom osnovom.

12 Smjernice o elektromagnetskoj kompatibilnosti

Krevetić BabyBed ispunjava mjerodavne zahtjeve norme IEC 60601-1-2:2007 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC).

Krevetić je namijenjen za upotrebu u bolničkom okruženju, ali ne u blizini visokofrekvencijske kirurške opreme ni uređaja za magnetsku rezonanciju.

UPOZORENJE: Upotreba opreme i kabela različitih od onih koje specificira ili isporuči proizvođač ove opreme može uzrokovati povećane elektromagnetske emisije ili smanjenu otpornost na elektromagnetska zračenja opreme i dovesti do nepravilnosti u radu.

UPOZORENJE: Prenosiva RF komunikacijska oprema (npr. mobiteli, radijski prijenosnici, antenski kabele i vanjske antene) smije se upotrebljavati na udaljenosti od najmanje 30 cm od svakog dijela krevetića BabyBed, uključujući i kabele specificirane od proizvođača. U suprotnom je moguće pogoršanje radnih svojstava opreme.


NAPOMENA: Značajke opreme u pogledu EMISIJA omogućuju njezinu upotrebu u industrijskim prostorima i bolnicama (CISPR 11 klasa A). Ako se upotrebljava u stambenom okruženju (za koje je obično potrebna CISPR 11 klasa B) oprema možda neće pružati odgovarajuću zaštitu od radiofrekvencijske komunikacije. Korisnik može poduzeti mjere za ublažavanje tog utjecaja, premještanjem ili promjenom orijentacije opreme.

Za daljnje podatke o elektromagnetskoj sukladnosti s odgovarajućim normama emisija i otpornosti, ispitnim razinama, itd. obratite se Kanmedu.

13. Odlaganje



Po isteku vijeka trajanja krevetića Kanmed BabyBed, treba ga reciklirati u skladu s EU Direktivom 2002/96/EZ o otpadnoj opremi (WEEE), ako je primjenjivo.

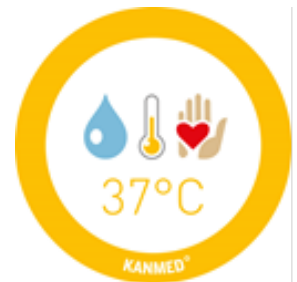

Gårdsfogdevägen 18B
SE-168 67 BROMMA – Stockholm
Švedska

Telefon +46 8 56 48 06 30

E-adresa: info@kanmed.se

Internet: www.kanmed.se

Distributer:



Kanmed AB

Gardsfogdevägen 18 B
16867 Bromma

E-Mail info@kanmed.se

Telefon +46 85 64 80 630