

Universalklammer. Art. no.: BW3-0837

Används för att montera Kanmed BW3 kontrollenhet säkert på Kanmed BabyBed's alternativt andra sängar.
Universalklammern ersätter fr o m 2017-03-20 standardhandtaget på alla BabyWarmer BW3.

Universalklammer med
adapterplatta.
Art no.: BW3-0837

Klammern monteras på BW3
kontrollenhet som visas på
bilden.

Den kan monteras i fyra olika
positioner för att anpassas till
diverse önskemål.
Det görs lätt genom att lossa 4
skruvar.

Universalklammern med adapter för
BW3.



Universalklammern monterad på BW3 så som den normalt
kommer att levereras.



Exempel

BW3 med universalklammern
monterad på en Kanmed Baby
Bed med sidorails.



BW3 med universalklammern monterad på en säng med handtag fram.




BW3 med universalklammern
monterad på ett horisontellt
25mm rör. Kan monteras på
horisontella eller vertikala
runda eller fykantiga rör med
diameter från 15 till 35mm



"Under säng BabyWarmer hållare".

Art. no.: BB-112
Standard på all nya sängar från
~April 2017
Kan lätt monteras på redan
sålda sängar.
BW3 med universalklammern
kan monteras under alla
sängar med detta nya
tillbehör.
Det är tillräckligt brett för att
en gammal BW50 skall få plats.

BB-112 BabyWarmer-hållaren. Här
monterad under en Kanmed BabyBed

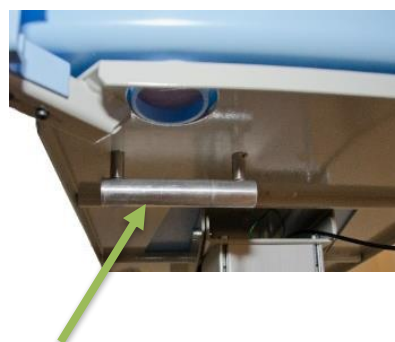

BW3 med
universalklammern och
BB-112 fästet under en
säng.



BabyWarmer är lätt att avläsa
och väl skyddad. Fungerar inte
om man vill ha dubbla
förvaringslådor fram.



Se fler exempel nästa sida!

<p>Beslag för 25mm rör. Art. no.: 800-0527 Konstruktionen gör att BW3 kontrollenhet lutas framåt för att lätt kunna läsas av. Kräver att du har Bracket Handle (se nedan) eller Universalklammern. Ena ratten är till för att låsa mot röret och den andra för att låsa kontrollenheten. OBS: Ingår i Bakstativ Komplet, se nedan.</p>	<p>800-0527 passar för både Universalklammern och för Bracket Handle</p> 	<p>800-0527 monterat på ett 25mm rör</p> 	<p>800-0527 monterat på ett 25mm rör och med en BW3 monterad..</p> 
<p>Bakstativ komplett Art. no.: BB-106 eller BB-107 för tvillingsängar. Komplett kit som innehåller beslag mot sängen, ett 25 mm rör och 800-0527 beslag samt Bracket Handle 800-0057 (se nedan). Passar alla Kanmed BabyBed's av modell BB100-401F</p>	<p>Bakstativ med BW3 och Bracket Handle.</p> 		<p>BW3 med universalklammern</p> 
<p>Bracket Handle Art. no.: 800-0057 Ersätter tidigare standardhandtag och universalklammern. För montering av BW3 på beslag 800-0527 eller på sängar med sidorails.</p>	<p>800-0057 Bracket handle</p> 	<p>BabyWarmer med Bracket Handle på beslaget 800-0527</p> 	<p>BabyWarmer med Bracket Handle på säng med sidorails</p> 

OBS: Alla priser är exkl moms. Frakt tillkommer om inte annat avtalas.