

Luftslangskydd från Kanmed AB.

Alla som jobbat på OP avdelning, anestesi, intensivvård m.m. känner nog till hur mycket efterarbete som krävs för att göra en veckad slang ren.

Har man istället använt ett slangskydd från Kanmed underlättas rengöringen och rengöringstiden förkortas, vilket uppskattas av personalen.

Slangskydden är i första hand avsedda för Kanmed WarmCloud luftslangar men passar även de flesta fabrikat av patientvärmeutrustning.

Kanmed kan nu också erbjuda marknadens billigaste slangskydd, så att priset inte hindrar användandet överallt där de gör nytta.



Art.-Nr.	Produktbeskrivning	Förpackning
700-0882	Slangskydd	50 styck/box

Storlek: L 200 cm x B 15 cm.



Så här enkelt är det att använda Kanmed Slangskydd.

1. Trä plastskyddet över luftslangarna hela vägen ända ner till huvudenheten.
2. Fäst plastskyddet vid munstycket (patienten) med lämplig metod, slangklämma, tape eller liknande.
3. Byt till rena plastskydd efter varje patient för att säkerställa god hygien.

Välkommen att beställa:

Mejl: order@kanmed.se

**Leveranstid är 1 vecka från inkommen beställning.
Förbrukningsvara.**

Materialspecifikation:

Polyethylene

Produkten är fri från latex, PVC och ftalater